



Quick Des Wipes Quick Des Wipes Lemon



VAH gelistet*

Tücher zur Schnelldesinfektion

- aldehydfrei
- gebrauchsfertig
- Tränklösung VAH-gelistet
- duftneutral oder mit Lemonduft

Präparatetyp

Mit alkoholischem Schnelldesinfektionsmittel getränkte Tücher. Gebrauchsfertig. Zur Desinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten und Flächen aller Art. Frei von Aldehyden. Besonders geeignet für alle Bereiche, in denen eine schnelle Wirksamkeit erforderlich ist.

Zusammensetzung

Wirksamer Bestandteil in 100 g Lösung: 36,6 g Ethanol, 0,06 g Didecyldimethylammoniumchlorid, Duftstoffe

Chemisch-physikalische Daten

pH-Wert: 7,0 +/- 1,0
Flammpunkt: 25°C

Anwendungsgebiete

Gem. Medizinprodukteverordnung: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen nicht-invasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

Anwendung

Alkoholbeständige Flächen bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Einwirkzeiten

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH-Richtlinien zur Flächendesinfektion (hohe Belastung):	5 Min.*
Begrenzt viruzid inkl. Vakzinia, BVDV, HBV/ HIV/HCV gem. RKI/DVV:	1 Min.
Rota-Viren:	1 Min.
tuberkulozid:	2 Min.

* Tränkflüssigkeit gelistet in der 5-Min. Spalte der VAH-Liste

Lieferformen

Einzelpackung	Verkaufseinheit	Ref.-No.
Duftneutral		
Dose à 120 Tücher	1 x 1 Dose	09930
Nachfüllpack à 120 Tücher Lemon	1 x 1 Beutel	09931
Dose à 120 Tücher	1 x 1 Dose	09932
Nachfüllpack à 120 Tücher	1 x 1 Beutel	09933

Quick Des Wipes baua: Reg.-Nr. N-51832
Quick Des Wipes Lemon baua: Reg.-Nr. N-53037

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Frankfurt/Main:
Gutachten zur Flächendesinfektion nach VAH-Richtlinien vom 05.12.2015.

Prof. Dr. Pitten, Gießen:
Gutachten zur Flächendesinfektion nach VAH-Richtlinien vom 14.03.2017.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:
Gutachten zur Vakzinia-Viren-Wirksamkeit vom 27.09.2005.
Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit vom 23.09.2002.
Gutachten zur Rota-Viren-Wirksamkeit vom 18.06.2008.

Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin:
Gutachten zur Flächendesinfektion mit Mechanik vom 19.04.2017

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Hinweis

Öffnen Sie die Nachfüllpackung. Formen Sie aus der geöffneten Packung eine Rolle. Lassen Sie den Inhalt inkl. Beutel direkt in die Spenderdose gleiten. Ziehen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel der Spenderdose und setzen Sie den Deckel wieder auf die Dose. Bitte befüllen Sie die Dose nur mit einer Nachfüllpackung mit SafeLine Quick Des Wipes.



AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstr. 16 / 21423 Winsen (Luhe), Germany
Tel.: +49 (0)4171 - 8480-0 / www.ampri.de / info@ampri.de



bioSight GmbH
Brasselsbergstr. 3 / 34132 Kassel, Germany
Tel.: +49 (0)561 - 81678111

