



Instru Des Direkt N

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten

- Mit Korrosionsschutz
- Ultraschallbad-geeignet
- Sehr reinigungsstark
- Speziell für rotierende und dentalmedizinische Instrumente geeignet

Präparatetyp

Gebrauchsfertiges, aldehyd- und phenolfreies Präparat für die manuelle Tauchdesinfektion und Reinigung von Bohrern, Fräsern, Diamantschleifern sowie anderen rotierenden und dentalmedizinischen Instrumenten.

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten aller Art. Besonders geeignet für rotierende und dentalmedizinische Instrumente. Zum Einsatz im Ultraschallbad geeignet.

Wirkpektrum und Einwirkzeiten

- | | |
|--|--------|
| - Bakterizid: | 5 min. |
| - Tuberkulozid: | 5 min. |
| - Levurozid (C. albicans): | 5 min. |
| - Begrenzt viruzid inkl. HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia-/Influenza-/Grippe-Viren: | 5 min. |

Anwendung

Zur nicht fixierenden desinfizierenden Reinigung im Tauchbadverfahren und zur Desinfektion im Tauchbadverfahren. Geeignet für die Anwendung in Ultraschallbädern. Instrumente, falls notwendig, nach vorheriger Grobreinigung, in geöffnetem Zustand in die Gebrauchslösung einlegen und mechanisch reinigen. Sämtliche Flächen und Hohlräume müssen von der Gebrauchslösung vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit VE-Wasser (vollentsalztem Wasser) abspülen und weiter aufbereiten.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 2,0 g Kaliumhydroxid



Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen: klare, farblose Lösung; pH-Wert (Konzentrat): 13,5 +/- 0,5; Dichte (20 °C): 1,006 +/- 0,005 g/ml

Lieferform

Einzelverpackung	Verkaufseinheit	Artikelnummer
5 Liter Kanister	1x 5 Liter	09970-D
10 Liter Kanister	1x 10 Liter	09971-D

Besondere Gefahrenhinweise

Propan-2-ol; Kaliumhydroxid. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.



AMPri Handelsgesellschaft mbH

Benzstr. 16 • 21423 Winsen (Luhe) • Germany
Tel. +49 (0)4171- 8480-0 • www.ampri.de • info@ampri.de



bioSight GmbH

Brasselsbergstr. 3 • 34132 Kassel • Tel.: +49 (0)561 81678111