



VAH gelistete
Tränklösung

Quick Des Wipes Maxi

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- aldehydfrei
- gebrauchsfertig
- Tränklösung VAH-gelistet
- Tuchformat 30 x 32 cm

Präparatetyp

Alkoholische, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Besonders geeignet für alle Bereiche, in denen eine schnelle Wirksamkeit erforderlich ist.

Zusammensetzung

Wirksamer Bestandteil in 100 g Lösung:
36,6 g Ethanol,
0,06 g Didecyldimethylammoniumchlorid
Enthält Duftstoffe

Chemisch-physikalische Daten

pH-Wert: 7,0 +/- 1,0
Flammpunkt: 25°C

Anwendungsgebiete

Gem. Medizinproduktegesetz (MPG):
Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen nicht invasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung:
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

Anwendung

Flächen und Gegenstände bis zur vollständigen Benetzung mit den Safeline Quick Des Wipes Maxi abwischen und und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nach Tuchentnahme den Deckel des Feuchttuchspenders wieder verschließen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH-Richtlinien zur Flächendesinfektion (hohe organische Belastung): 2 Min.*
Begrenzt viruzid inkl. Vaccinia, BVDV, HBV/HIV/HCV gem. RKI/DVV-Leitlinie: 1 Min.
Rota-Viren: 1 Min.
tuberkulozid: 2 Min.

* Tränkflüssigkeit gelistet in der 5-Min. Spalte der VAH-Liste

Lieferformen

	Verkaufseinheit	Ref.-No.
Einzelpackung Set mit Spendereimer und 90 Tüchern	1 x 1 Set	09928
Nachfüllpack mit 90 Tüchern	1 x 1 Beutel	09929

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Frankfurt/Main:
Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 28.05.2012.

Prof. Dr. Pitten, Gießen:
Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 07.08.2012.
Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit vom 07.08.2012.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:
Gutachten zur Vakzinia-Viren-Wirksamkeit vom 27.09.2005.
Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit vom 23.09.2002.
Gutachten zur Rota-Viren-Wirksamkeit vom 18.06.2008.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Achtung
Entzündbarer Feststoff. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Befüllen des Feuchttuchspenders

Safeline Quick Des Wipes Maxi Nachfüllpackung inkl. Beutel direkt in den Feuchttuchspender gleiten lassen. Daraufhin den Nachfüllpack öffnen. Ziehen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel des Feuchttuchspenders und setzen Sie den Deckel wieder auf den Feuchttuchspender. Bitte befüllen Sie den Spender nur mit einer Nachfüllpackung Safe Line Quick Des Wipes Maxi.



AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstr. 16 / 21423 Winsen (Luhe), Germany
Tel. +49 (0)4171 - 8480-0 / www.ampri.de / info@ampri.de



bioSight GmbH
Brasselsbergstr. 3 / 34132 Kassel, Germany
Tel.: +49 (0)561 - 81678111