



Tray Clean

Konzentrat zur Reinigung von dental-medizinischen Abdrucklöffeln

- löst Alginate und Zemente in kürzester Zeit
- sehr gute Materialverträglichkeit
- hohe Reinigungsleistung



Präparatetyp

Reinigungskonzentrat für dentale Abdrucklöffel und Instrumente

Zusammensetzung

Anionische Tenside 5 – 15 %.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: klare, gelbliche
Lösung pH-Wert: 8,5 +/-0,5

Anwendungsgebiete

Selbsttätige Reinigung von dentalmedizinischen Abdrucklöffeln. Hohe Reinigungskraft bei Resten von Alginaten, Haftlacke und Zementen. Auch geeignet zur Reinigung von dentalmedizinischem Instrumentarium aus Kunststoffen, nichtrostenden Metallen und eloxiertem Aluminium. Im Ultraschallbad einsetzbar.

Anwendung

Je nach Verschmutzung eine 5 – 10 %ige Anwendungslösung herstellen (50 – 100 ml Konzentrat mit Wasser auf 1 Liter auffüllen). Die Verwendung von warmem Wasser (max. 40 °C) erhöht die Reinigungsleistung. Abdrucklöffel und Instrumente grob vorreinigen und in die Anwendungslösung einlegen. Einige Stunden oder über Nacht einwirken lassen. Abdrucklöffel und Instrumente anschließend unter fließendem Wasser mit einer Bürste von gelösten Schmutzpartikeln reinigen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/ Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Lieferformen

Einzelpackung 5 Liter Kanister	Verkaufseinheit 1 x 5 L	Ref.-No. 09985
-----------------------------------	----------------------------	-------------------

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Gefahr: Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalz; Glykolsäure.
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstr. 16 / 21423 Winsen (Luhe), Germany
Tel. +49 (0)4171 - 8480-0 / www.ampri.de / info@ampri.de



bioSight GmbH
Brasselsbergstr. 3 / 34132 Kassel, Germany
Tel.: +49 (0)561 - 81678111