



VAH gelistet

Prent Des

Lösung zur Desinfektion und Reinigung von Abformungen und zahntechnischen Werkstücken

- gebrauchsfertig
- garantierte Dimensionsgenauigkeit
- greift die Oberflächen nicht an



Präparatetyp

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von Abformungen aus Polyether, Silikonen, Alginaten und Hydrokolloiden sowie alle anderen zahntechnischen Werkstücken.

Zusammensetzung

Wirksamer Bestandteil in 100 g Lösung: Benzalkoniumchlorid 0,48 g; Glyoxal 0,20 g; Glutaraldehyd 0,01 g.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: hellblaue, klare Lösung
 pH-Wert: 5,5 +/- 1,0
 Dichte (20 °C): 1,000 +/- 0,003

Anwendungsgebiete

Gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Desinfektion und gründlichen Reinigung von zahntechnischen Werkstücken und Prothetikmaterial wie Abformungen aus Polyether, A/C Silikonen, Alginaten und Hydrokolloiden.

Anwendung

Werkstücke aus Alginaten und Hydrokolloiden kurz eintauchen und anschließend 5 Min. abtrocknen lassen. Andere Materialien 5 Min. in die Lösung einlegen, anschließend mit Wasser abspülen.

Konzentrationen und Einwirkzeiten

bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH-Richtlinien geprüft bei hoher Belastung:	5 Min.
HBV/HIV/HCV, BVDV, Vakzinia-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV)	1 Min.

Lieferformen

Einzelpackung 5 Liter Kanister	Verkaufseinheit 1 x 5 L	Ref.-No. 09983
-----------------------------------	----------------------------	-------------------

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Frankfurt/Main:
 Gutachten zur Instrumentendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 02.08.2013.

Dr. Suchomel, Wien:
 Gutachten zur Instrumentendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 01.08.2013

Besondere Hinweise

Enthält Glyoxal. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zu gelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



AMPri Handelsgesellschaft mbH
 Benzstr. 16 / 21423 Winsen (Luhe), Germany
 Tel. +49 (0)4171 - 8480-0 / www.ampri.de / info@ampri.de

 bioSight GmbH
 Brasselsbergstr. 3 / 34132 Kassel, Germany
 Tel.: +49 (0)561 - 81678111

 0482 PZN - 9668018